

Aesculap Endoscopic Technology

Challenger Ti



AESCULAP®



Anleitung zur Demontage und Montage

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Erzeugnisse dienen. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Bei Missbrauch behalten wir uns Rücknahme der Kataloge und Preislisten sowie Regressmaßnahmen vor.

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Aesculap AG

Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen
Deutschland

Telefon +49 7461 95-0
Fax +49 7461 95-2600

www.aesculap.de




Aesculap Endoscopic Technology

Challenger Ti

DEMONTAGE

PFLEGE


MONTAGE

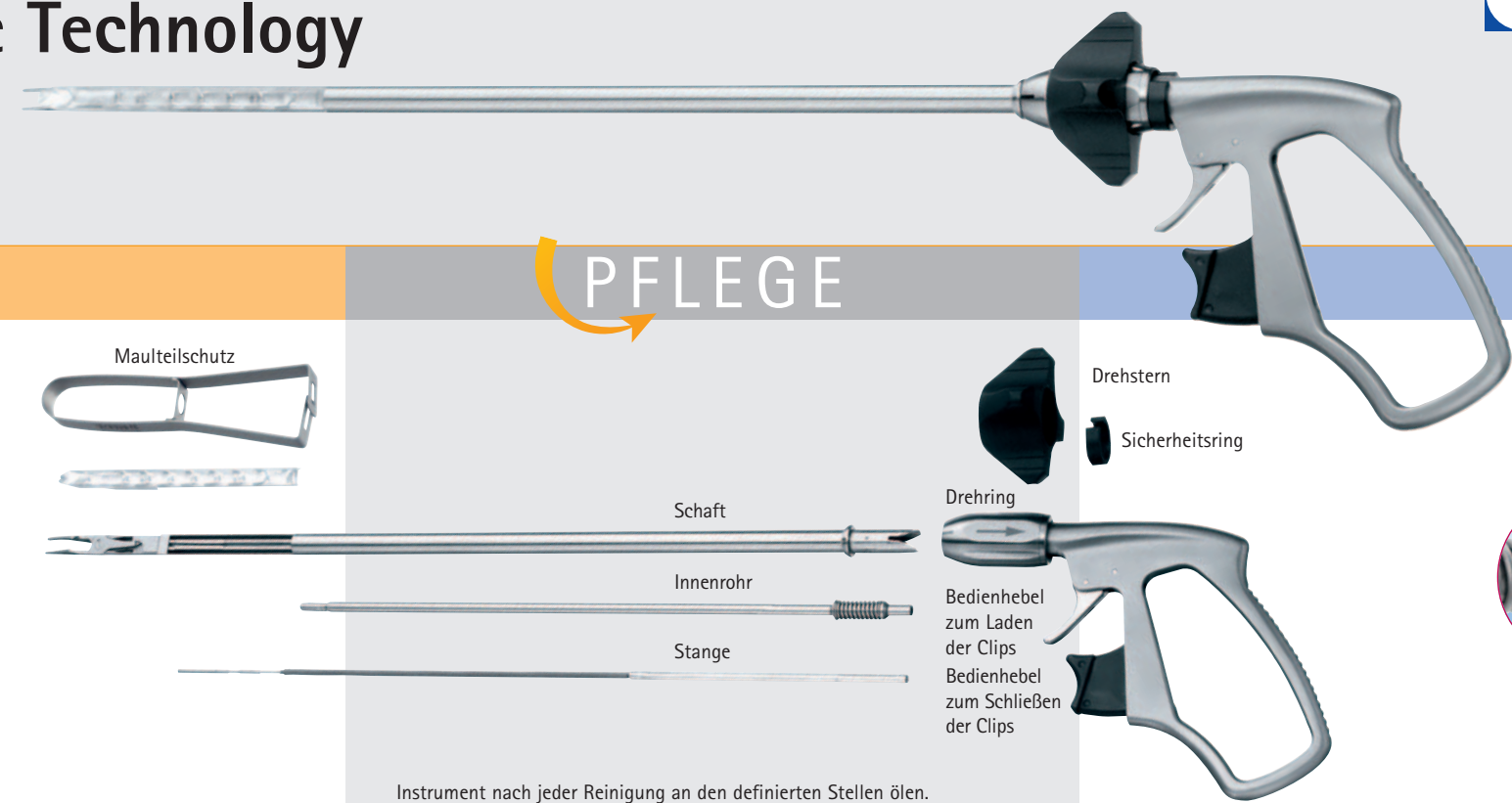

I Wenn sich das Clipmagazin noch im Schaft befindet, den Bedienehebel zum Schließen der Clips drücken. Jetzt kann das Clipmagazin entfernt und entsorgt werden.



II Drehstern vom Drehring abziehen und entfernen.

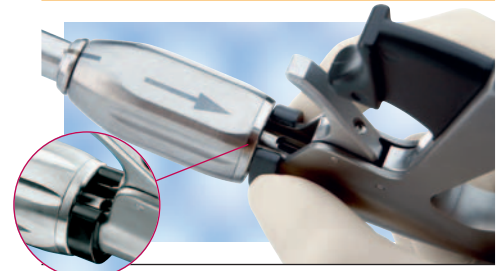


III Den Sicherungsring so drehen, dass seine Öffnung in Richtung des silbernen Bedienehebels zum Laden der Clips zeigt.




IV Schaft festhalten. Drehring bis zum Anschlag zurückziehen. Dadurch wird der Sicherungsring zurückgeschoben und löst den Schaft vom Griff.



V Schaft festhalten und aus dem Griff ziehen.

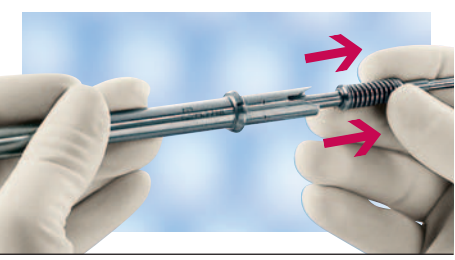

VI Innenrohr mit Stange aus dem Schaft ziehen.

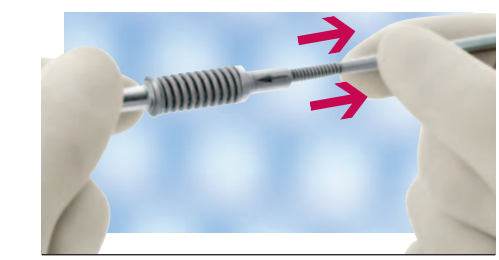

VII Stange aus dem Innenrohr ziehen.

Instrument nach jeder Reinigung an den definierten Stellen ölen.



Für eine reibungslose Funktion des Instruments alle beweglichen Teile und Gelenke mit einem dampfdurchlässigen Öl (z.B. Aesculap Sterilit Öl JG600) ölen. Nach dem Ölen das Maulteil mehrmals durch Drücken des schwarzen Bedienehebels öffnen und schließen.



Immer den Maulteilschutz verwenden, um Beschädigungen der Maulteile während des Transports und der Aufbereitung zu vermeiden.

AUFBEREITUNG & ZUBEHÖR


- Kontaminiertes Produkt schnellstmöglich aufbereiten
- Für Hinweise zur Reinigung, Desinfektion und Sterilisation beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung
- Das Produkt kann sowohl im zerlegten als auch zusammengebauten Zustand sterilisiert werden
- Aktuelle Informationen zur Aufbereitung siehe auch Aesculap Extranet unter www.aesculap-extra.net
- Zubehör und Ersatzteile siehe Prospekt C766 oder unter www.endoskopie-katalog.de

REPARATUR


Reparaturen dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die von Aesculap hierzu ermächtigt wurden. Nur so bleiben Garantie und Gewährleistungsansprüche uneingeschränkt erhalten. Bei Reparaturen einschicken an: Aesculap Technischer Service, Am Aesculap-Platz, D-78532 Tuttlingen. Weitere Serviceadressen erfahren Sie über die oben genannte Adresse und über ats@aesculap.de

FUNKTIONSTEST


- Bedienehebel zum Laden der Clips bis zum Anschlag durchdrücken und wieder loslassen. Jetzt ist es nicht mehr möglich diesen Hebel nochmals zu betätigen. (Sicherheitsfunktion). Nachdem der schwarze Bedienehebel zum Schließen der Clips bis zum Anschlag durchgedrückt wurde, kann der silberne Bedienehebel zum Laden der Clips erneut betätigt werden.
- Schließen der Maulteile. Die Maulteile müssen parallel schließen und sich an ihren Spitzen berühren. Die Spitzen dürfen sich nicht überkreuzen. (Schereneffekt).
- Vor jedem Einsatz die Stange auf Risse, verbogene und abgebrochene Teile prüfen.
- Falls notwendig fehlerhafte Teile austauschen oder das Instrument zur Reparatur einschicken.

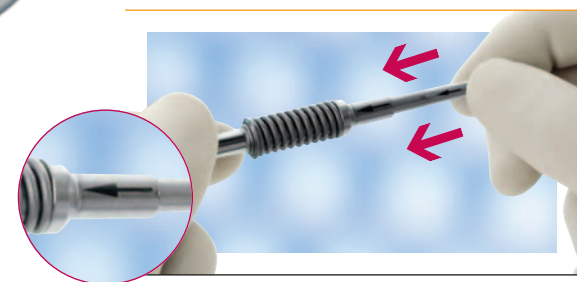

I Vor jedem Einsatz die Stange auf Risse, verbogene und abgebrochene Teile prüfen. Stange in das Innenrohr schieben.

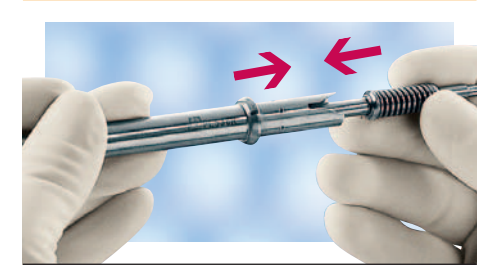

II Innenrohr mit der Stange in den Schaft einführen.

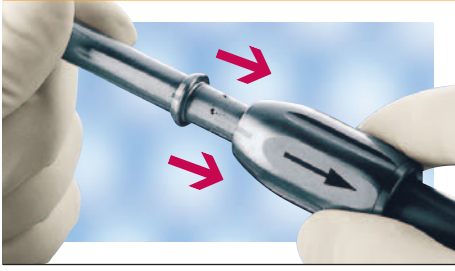

III Drehring bis zum Anschlag zurückziehen und Schaft hineinschieben. Die schwarzen Markierungen an Drehring und Schaft müssen übereinstimmen. Drehring danach wieder loslassen.



IV Sicherheitsring über den Griff bis zum Drehring aufschieben.



V Sicherheitsring um 180° verdrehen. Die Ringöffnung zeigt nach oben.



VI Drehstern auf den Drehring schieben.