



Mehr Hintergrundinformationen
sowie Wissenswertes über das Leben
mit Inkontinenz finden Sie auf:
www.bbraun.de/kontinenz-patienten.

MASSBAND KONDOM-URINALE

KONTINENZVERSORGUNG UND UROLOGIE. EIN SICHERES GEFÜHL.



KONDOM-MASSBAND
für selbsthaftende
Kondom-Urinale aus Silikon

Ø mm

25


29

32

36

41

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

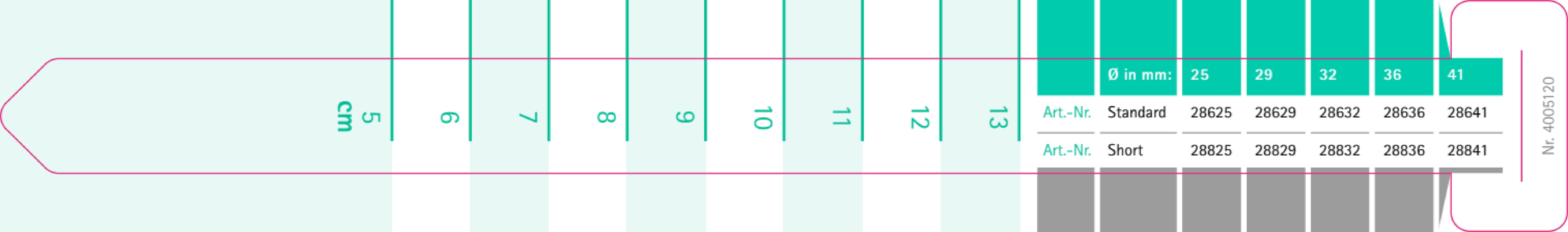

cm

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ø in mm:

25

29

32

36

41

Art.-Nr.

Standard

28625

28629

28632

28636

28641

Art.-Nr.

Short

28825

28829

28832


28836

28841


Nr. 4005120

KURZANLEITUNG


Wir sind für Sie da. Freundlich, zuverlässig, kompetent.
Service-Hotline: 05661 9147 7103

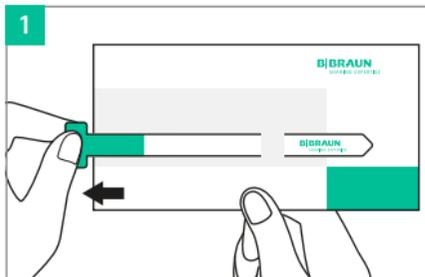


Entnehmen Sie das Maßband. Dieses Maßband dient der Ermittlung der exakten Größe des benötigten Kondom-Urinals. Bitte beachten Sie, je genauer ein Kondom-Urinal angepasst wird, desto sicherer ist die Klebeverbindung.

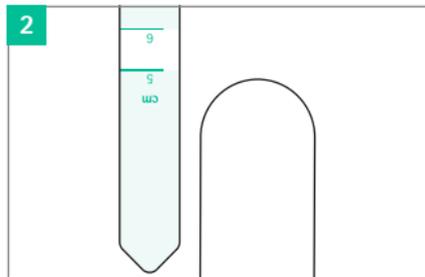

Bitte messen Sie zunächst die Penislänge (siehe Abbildung).

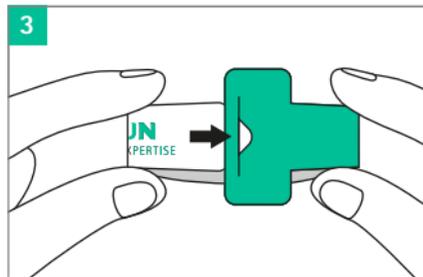

Um den Durchmesser zu bestimmen, verwenden Sie bitte die Messskala auf der Vorderseite. Schieben Sie die Spitze des Maßbandes durch den Schlitz am hinteren Ende.

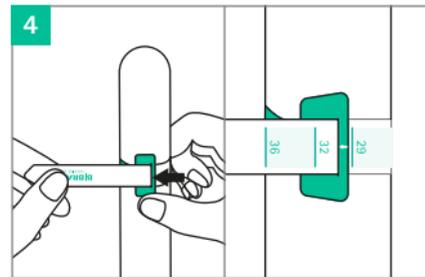

Führen Sie das Maßband über den Penis und ziehen Sie es in der Mitte des Penischaftes zusammen – achten Sie darauf, dass das Band die Penishaut nicht ab Schnürt. Die Pfeilspitze zeigt die korrekte Kondomurinalgröße an (z. B. 32 mm).

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel. (0 56 61) 9147-70 00 | E-Mail: info.de@bbraun.com | www.bbraun.de
Betriebsstätte: Melsungen | Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen

HD.03.11.21/1 Nr. 4005120 Stand: 11/2021