


# SeQuent® Please OTW Einführhilfe

## Anwendungsempfehlung

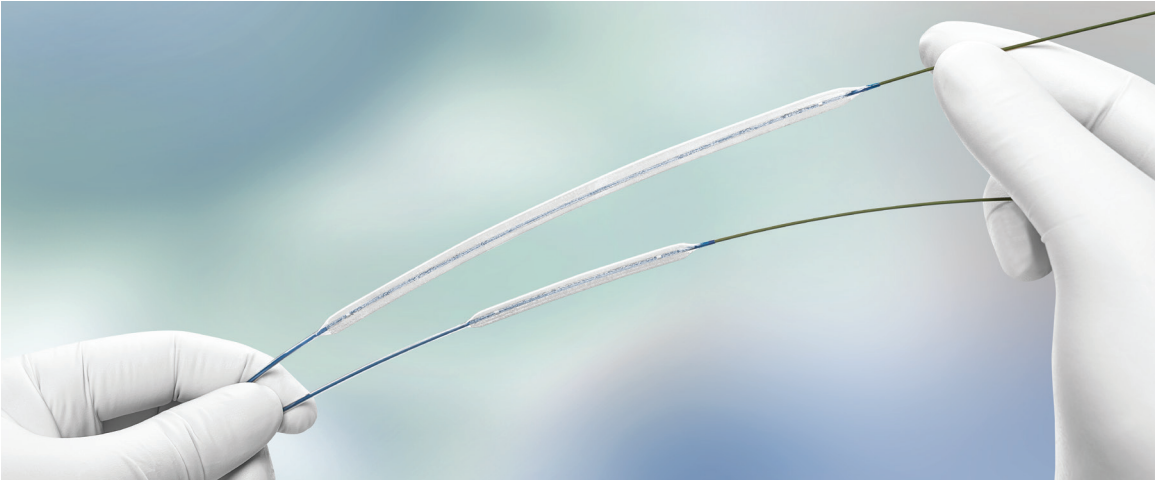

1. Die Tear-Away Schleuse auspacken, den Dilatator entfernen und die Schleuse mit der Spitze voran auf den Führungsdraht schieben. Voraussetzung ist, dass die Schleuse und der Führungsdraht bereits in den Patienten eingeführt sind.
2. SeQuent® Please OTW auspacken. Ballonschutzhülle vorsichtig nach distal abziehen und mit der Spitze voran auf den Führungsdraht schieben.
4. Den beschichteten SeQuent® Please OTW in die Tear-Away Schleuse schieben, so dass dieser abgedeckt ist.
4. Tear-Away Schleuse und SeQuent® Please OTW Katheter gleichzeitig bis zur Einführschleuse vorschieben.
5. Die Spitze der Tear-Away Schleuse und das Septum der Einführschleuse mit einer Hand festhalten.
6. Mit der anderen Hand den SeQuent® Please OTW Katheter vorsichtig am Schaft durch die Tear-Away Schleuse und durch die Einführschleuse vorschieben.
7. Wenn die gesamte Länge des SeQuent® Please OTW Katheterschaftes benötigt wird, die Tear-Away Schleuse an den dafür vorgesehenen Griffen aufbrechen und auseinander ziehen. Die Tear-Away Schleuse kann dadurch komplett vom SeQuent® Please OTW entfernt werden.


### Vorteil der Tear-Away Schleuse:

Durch Verwendung der Tear-Away Schleuse wird das unbeabsichtigte Berühren des beschichteten SeQuent® Please OTW Ballons verhindert.


## Anwendungsempfehlung




Tear-Away Schleuse mit Dilatator

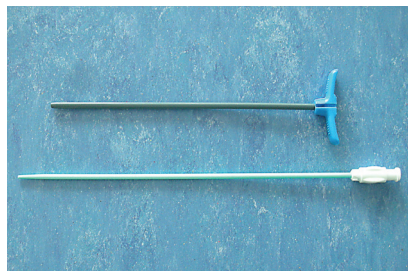


Tear-Away Schleuse und separater Dilatator

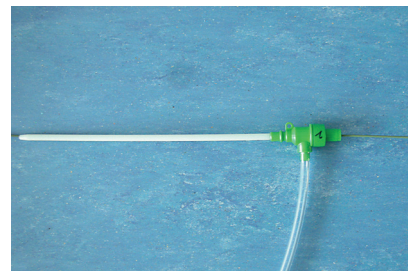

Einführschleuse mit Führungsdraht

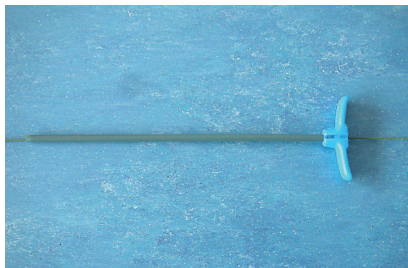

Tear-Away Schleuse auf Führungsdraht

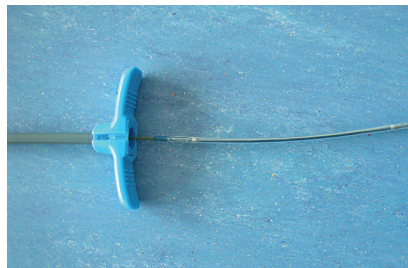

Tear-Away Schleuse und Ballonkatheter auf Führungsdraht




Ballon mit Tear-Away-Schleuse abgedeckt




Ballon in der Tear-Away-Schleuse vor der Einführschleuse




Festhalten der Tear-Away-Schleuse und Einführschleuse

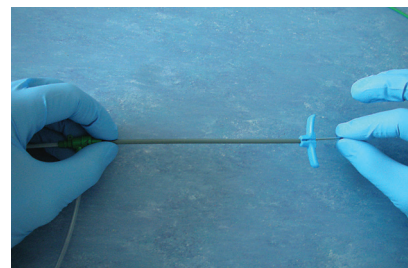


Katheter in Tear-Away-Schleuse vorsichtig in Einführschleuse schieben

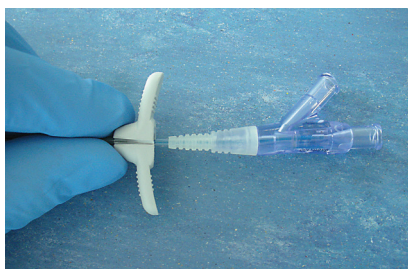

Griffe der Tear-Away-Schleuse und Adapter des SeQuent® Please OTW Katheters

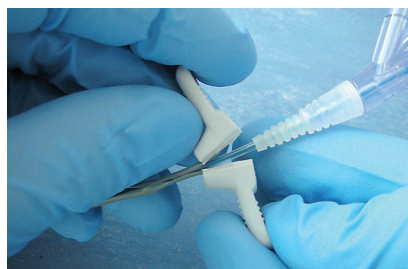

Aufbrechen der Tear-Away Schleuse

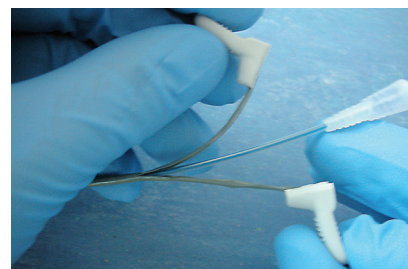

Entfernen der Tear-Away Schleuse

Einführhilfe für SeQuent Please OTW (6 F, 0,035")	Artikelnummer	
Länge 7 cm	5010851	
Länge 16 cm	5211869	

Einführhilfe für SeQuent Please OTW (4 F, 0,014")	Artikelnummer	
Länge 7 cm	5010848	
Länge 15 cm	5211870	