

# Askina® Derm

## Semipermeabler Transparent-Wundverband



B. Braun WoundCare

**Neu**  
Produktumstellung  
im August 2010

B. Braun Melsungen AG | OPM  
Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen  
Tel (0 56 61) 71-62 63 | Fax (0 56 61) 71-35 50  
[www.bbraun.de](http://www.bbraun.de) | [www.wundheilung.bbraun.de](http://www.wundheilung.bbraun.de)

W.03.06.10/1 Nr. 999 6713 Stand: 06/2010

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

# Askina® Derm


## Semipermeabler Transparent-Wundverband



### Produktumstellung auf das neue Askina® Derm ab August 2010

Dank innovativer Veränderungen wie dem neuen, einfacheren Anwendungssystem (siehe Anleitung rechts) sowie einer optimierten Wasserdampfdurchlässigkeitsrate ist das neue Askina® Derm noch besser.

Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die neuen Artikelnummern.

Produkt	Größe	VE	PZN	REF
Askina® Derm 	4,4 x 4,4 cm	5 Stück	0156222	F72028
	4,4 x 4,4 cm	100 Stück	7430086	F72030
	6 x 7 cm	5 Stück	0156239	F72031
	6 x 7 cm	100 Stück	7430092	F72033
	10 x 12 cm	5 Stück	0156245	F72034
	10 x 12 cm	50 Stück	7430100	F72036
	15 x 20 cm	10 Stück	7430123	F72038

Askina® Derm kann bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben.

Neues innovatives Anwendungssystem

Verbesserte MVTR\*

Verbesserte Klebeeigenschaften

Leichtes Entfernen

Sicherer Schutz vor Feuchtigkeit  
und Mikroorganismen

\* Moisture Vapour Transmission Rate = Wasserdampfdurchlässigkeitsrate

❶ Entfernen des Schutzpapiers mit Bedruckung von der klebenden Seite des Verbands.



❷ Positionieren des Verbands mit der klebenden Seite nach unten über der Wunde. Sanft andrücken.



❸ Seitliche Schutzfolien langsam mit beiden Händen entfernen. Verband mit abrollenden Bewegungen auf der gesunden Haut festdrücken.



❹ Nach Befestigung des Verbands Trägerfolie mit den grünen Pfeilen in Pfeilrichtung abziehen.