

Cystofix®

Suprapubische Blasendrainage



Cystofix®

Infektionsprophylaxe mit Suprapubischer Blasendrainage

Die Prävention von Krankenhausinfektionen ist eine der wichtigen Säulen für die Patientensicherheit. Krankenhausinfektionen sind immer im Fokus der Patienten, der Kostenträger, der Politiker und der Medien.

Mit einem Anteil von 30 bis 40% zählen Harnwegsinfektionen zu den häufigsten nosokomialen Infektionen. Sie können zu schwerwiegenden Komplikationen führen und sind die häufigsten Ursachen der im Krankenhaus auftretenden sekundären Sepsisfälle. Relevanz haben Harnwegsinfektionen darüber hinaus wegen der notwendig werdenden Antibiotikaverordnungen und dem daraus resultierenden Selektionsdruck auf Erreger.¹ Häufig sind es transurethrale Dauerkatheter, die mit einem hohen Risiko für eine ascendierende Harnwegsinfektion assoziiert sind. Eine effektive Infektionsprophylaxe bietet der suprapubische Blasenkatheeter, welcher die sensible Harnröhre umgeht. Katheterbedingte traumatische oder entzündliche subvesikale Infektionen und Komplikationen können dadurch vermieden werden.

Aus diesem Grund empfiehlt das Robert Koch-Institut, Berlin, bei längerfristig erforderlicher Blasendrainage (> 5 Tage) bevorzugt die Anwendung suprapubischer Blasenverweilkatheter.²

Ready-to-Use Punktions-Sets

Zeitsparendes und sicheres Arbeiten durch bereits voreingelegten Katheter



Silikonballonkatheter mit Integralballon

Punktions- und Wechsel-Sets von CH10 bis CH20



Erweitertes Portfolio Dilatations-Wechselsets bis CH 16



1 BVMed e.V., Berlin – Portal für Medizintechnik „Nosokomiale Infektionen“

2 Bundesgesundheitsblatt 2015 • 58, Seiten 641–650: "Prävention und Kontrolle Katheter-assoziiertes Harnwegsinfektionen" Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut, Berlin

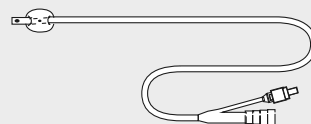
2 L Urinbeutel Urimed® SP

- Mit Ablasshahn
- Antirefluxventil zur Vermeidung von Urinrückfluss
- Nadelfreie Probenentnahme
- Belüftete Einstecklasche für den Ablasshahn zur Minimierung des Kontaminationsrisikos

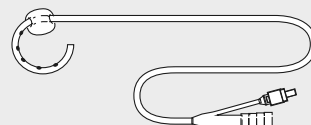


Legende

Silikonballonkatheter (gerade)



Silikonballonkatheter (engerollt)



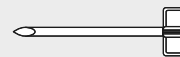
Pigtail-Polyurethankatheter



2L Ablasshahnbeutel mit Rückflusssperre



Spaltbare Punktionskanüle



Schiebeklemme



Katheterstopfen



Führungsdraht



Dilatator



Indikationsgerechte Spitzentypen für jede Anwendung

*PU = Polyurethan



Integralballon, kurze Spitze, Silikon



Pigtailspitze mit Standardballon, Silikon



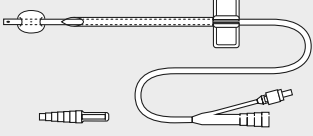
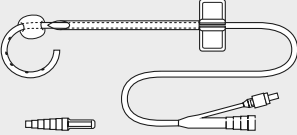
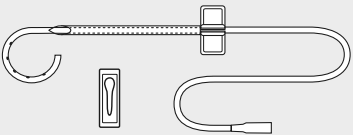
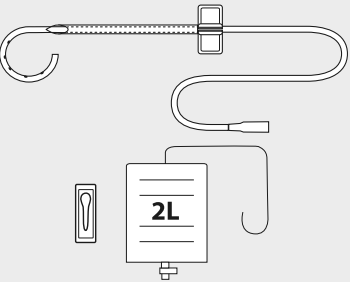
Pigtail für Erwachsene, PU*

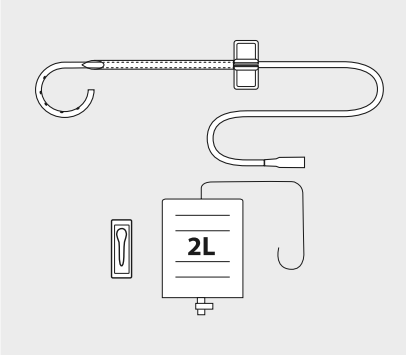


Pigtail, Pädiatrie, PU*

Cystofix® Punktions-Sets

Indikationsgerechte Sets für die Suprapubische Blasendrainage

Cystofix® Punktions-Sets	Katheter		Punktionskanüle		VE (St.)	Art.-Nr.	PZN
	Größe (CH)	Form	Länge (cm)	Länge (cm) Ø (mm)			
Punktions-Sets „Ready-to-Use“ mit Integralballon, Silikon							
	● 12	gerade	40	12 5,6	1	4450200	11584820
	● 14 NEU	gerade	40	12 5,6	1	4450220	11885964
Punktions-Set „Ready-to-Use“ mit Pigtail und Standardballon, Silikon							
	● 12	engerollt	53	12 5,6	1	4450210	11584843
Punktions-Sets mit Polyurethan Pigtailkatheter							
Komplett-Sets „Ready-to-Use“							
	● 10	engerollt	65	8 3,6	1	4450100	11584702
	● 10	engerollt	65	12 3,6	1	4450120	11584719
	● 15	engerollt	65	12 5,6	1	4450130	11584725
Komplett-Sets mit 2 L Urinbeutel „Ready-to-Use“							
	● 10	engerollt	65	8 3,6	1	4450150	11584754
	● 10	engerollt	65	12 3,6	1	4450160	11584760
	● 15	engerollt	65	12 5,6	1	4450170	11584777

Cystofix® Punktions-Sets	Katheter		Punktionskanüle		VE (St.)	Art.-Nr.	PZN		
	Größe (CH)	Form	Länge (cm)	Länge (cm) Ø (mm)					
Cystofix® Paed „Ready-to-Use“ Punktions-Set für die Pädiatrie									
		○ 10	engerollt	50	5	3,6	1	4450180	11584814

Cystofix® – Ready-to-Use

Punktions-Set mit bereits eingelegtem Katheter zum sofortigen Einsatz



Entnehmen Sie die Punktionskanüle mit dem bereits eingelegten Katheter aus der Packung. Der Katheter ragt über die transparente Schutzhülse der Punktionskanüle hinaus. **Die Schutzhülse noch nicht entfernen.**



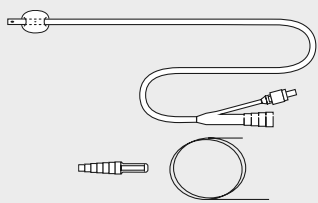
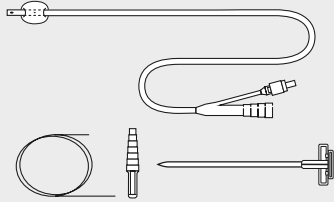
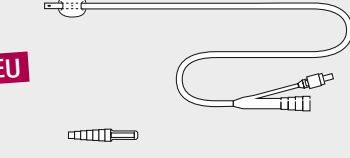
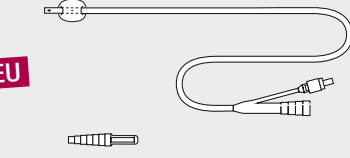
Ziehen Sie nun den Katheter innerhalb der Schutzhülse vorsichtig zurück, bis die letzte Markierung auf dem Katheter am Kanülenende an der Griffplatte erscheint. **Die Schutzhülse dient dem Katheter als Führung und verhindert eine Beschädigung des Katheters beim Zurückziehen in die Punktionskanüle.**



Ziehen Sie nun die Schutzhülse von der Punktionskanüle mit dem bereits richtig positionierten Katheter ab. Die Katheterspitze darf nicht mehr in der Kanülenabschrägung sichtbar sein. Nun kann die perkutane Punktion der Harnblase erfolgen.

Cystofix® Wechsel-Sets

Mit Integralballon

Cystofix® Wechsel-Sets	Katheter		Führungsdraht	VE	Art.-Nr.	PZN		
	Größe (CH)	Form					Länge (cm)	Länge (cm)
Wechsel-Sets mit Silikonballonkatheter und Führungsdraht								
	● 10	gerade	40	80	0,9	1	4450010	11156343
	● 12	gerade	40	80	0,9	1	4450012	11156366
	● 14 NEU	gerade	40	80	0,9	1	4450014	11156372
	● 16	gerade	40	80	0,9	1	4450016	11156389
Dilatations-Wechsel-Sets mit Silikonballonkatheter, Führungsdraht und Dilatator								
	● 12	gerade	40	80	0,9	1	4450512	11156395
	● 14 NEU	gerade	40	80	0,9	1	4450514	11156403
	● 16 NEU	gerade	40	80	0,9	1	4450516	11156426
Wechsel-Sets ohne Führungsdraht								
	● 12	gerade	40	-	-	5	4450712	11156432
	● 14	gerade	40	-	-	5	4450714	11156449
	● 16 NEU	gerade	40	-	-	5	4450716	11156455
	● 18	gerade	40	-	-	5	4450718	11156461
	● 20	gerade	40	-	-	5	4450720	11156478
Wechsel-Sets ohne Führungsdraht – einzeln verpackt								
	● 12	gerade	40	-	-	1	4450812	11156484
	● 14	gerade	40	-	-	1	4450814	11156490
	● 16 NEU	gerade	40	-	-	1	4450816	11156509
	● 18	gerade	40	-	-	1	4450818	11156515
	● 20	gerade	40	-	-	1	4450820	11156521



Begleitend bieten wir Anwendern in unserem B. Braun Media Service Lehrfilme an, anhand derer sie Gelerntes vertiefen und wiederholen können.