


# Infusomat<sup>®</sup>plus Leitung - Handhabungsposter

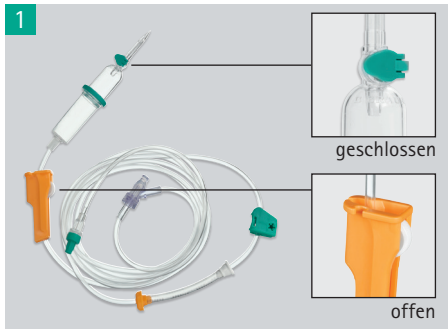

- Entnahme des Infusionsbestecks aus der Verpackung:
- Belüftungsklappe geschlossen
  - Rollenklemme offen



- Anstechen des aufrecht stehenden Infusionslösungsbehälters (z. B. Glasflasche, Ecoflac<sup>®</sup>, etc.)
- Rollenklemme schließen



- Flüssigkeitsspiegel einstellen:
- Tropfkammer bis grünen Ring füllen (3a&b)
  - Nach Befüllen gegen unteren Teil der Tropfkammer schnippen




- Nach dem Befüllen der Tropfkammer die Belüftungsklappe öffnen und während der Infusion bei allen Behälterarten geöffnet lassen



- Rollenklemme öffnen
- Leitung manuell entlüften



1. Gerät einschalten und Selbsttest des Gerätes abwarten.
2. Pumpentür durch nach vorne Ziehen des Türhebels öffnen

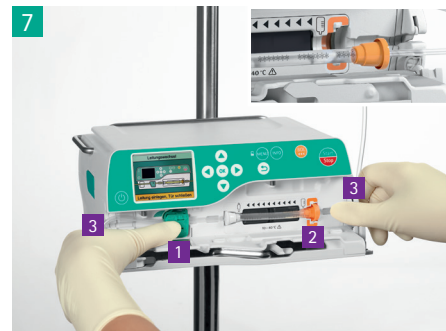

1. Einlegen der Infusomat<sup>®</sup>plus Leitung: Grüne Sicherheitsklemme in die grüne Aufnahme einlegen und festdrücken (→ **KLICK**)
2. Orangefarbenen Clip in die orange Aufnahme der Pumpe
3. Infusionsleitung links und rechts in die Nut drücken



1. Pumpentür mit gezogenem Türhebel mit Hilfe beider Hände schließen
2. Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, **ROLLENKLEMME ÖFFNEN** mit OK bestätigen  
Die Pumpe führt eine Kalibrierung der Leitung durch
3. Anweisungen im Display folgen