



Infusomat® compact^{plus}

Kurzanleitung

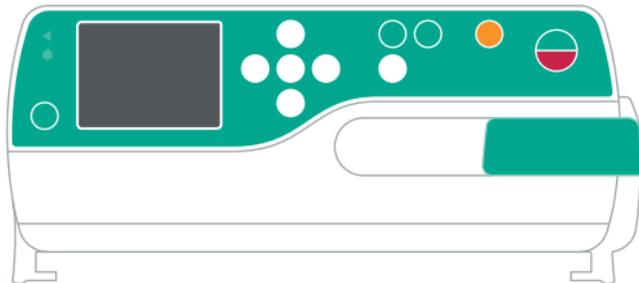

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

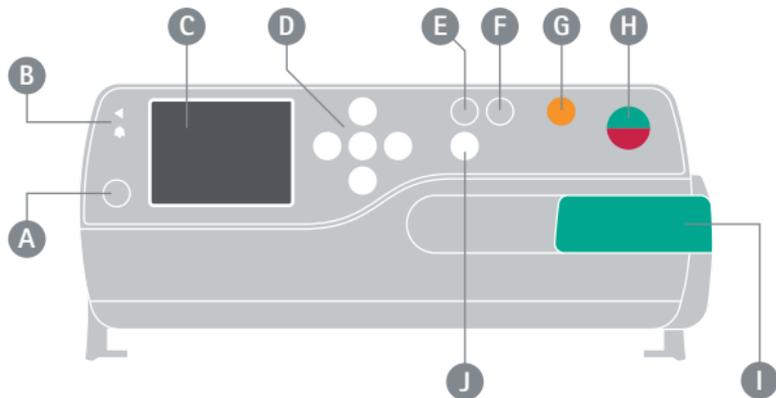

A Ein/Aus-Taste

B Statusanzeige

C Display

D Pfeiltasten/OK-Taste

E Menü-Taste

F Info-Taste

G Bolus-Taste


H Start/Stopp-Taste

I Türhebel


J Zurück-Taste

Einschalten & Selbsttest

1. Einschalten mit -Taste

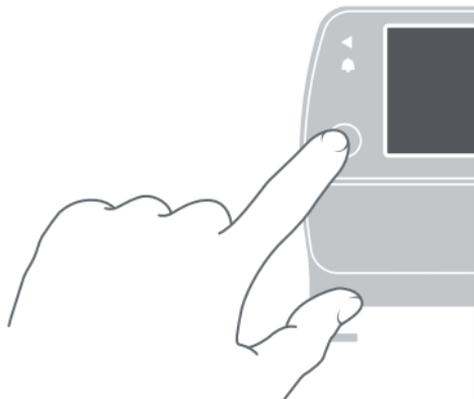


2. Funktionalität der Status-LEDs prüfen

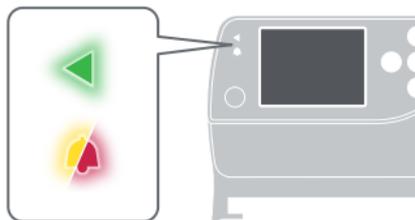


3. Auf akustische Signale achten




4. Displaymeldung beachten

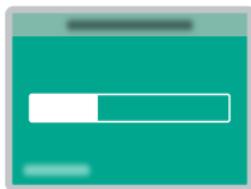

1. Pumpentür durch Ziehen des Türhebels öffnen

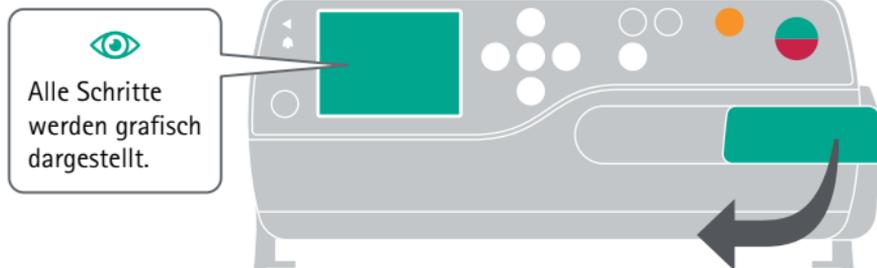

2. Leitung einlegen und auf die richtige Positionierung der farbigen Leitungselemente achten

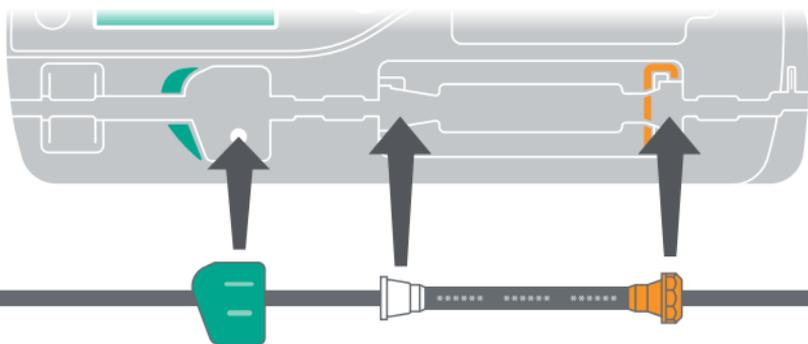

Leitung einlegen


3. Beim Einlegen der Leitung auf die folgenden Punkte achten:



Die grüne Sicherheitsklemme bis zum „Klick“ in die Aufnahme drücken.

HINWEIS


Das Silikonelement darf nicht verdreht sein!

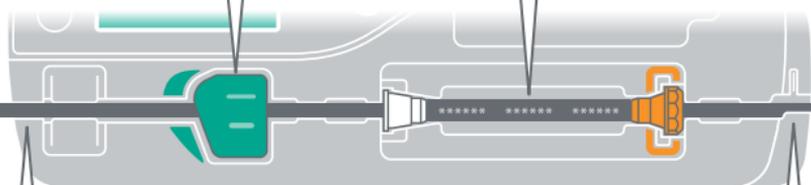


Sicherstellen, dass die Infusionsleitung sich in der rechten und linken Nut befindet.

4. Tür schließen und mit Türhebel verriegeln

5. Rollenklemme öffnen und Hinweis auf dem Display mit der **OK**-Taste bestätigen

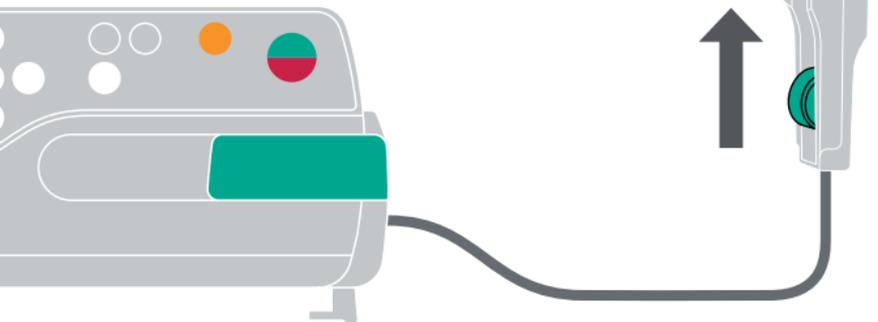


6. Leitungstyp auswählen

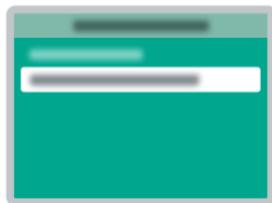

Mit den **↕** **↕**-Tasten
den Leitungstyp anwählen
und durch Drücken der
OK-Taste bestätigen.

Therapie starten

1. Eingabe der Förderrate

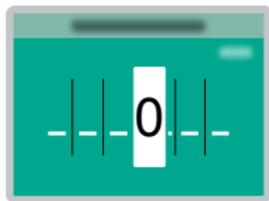

Mit den ◀▶-Tasten zu der gewünschten Zahlenstelle navigieren und mit den ▲▼-Tasten die Zahl einstellen.


2. Eingabe abschließen

Optionale Einstellungen



Drücken der -Taste um eine Volumen- oder Zeitvorwahl vorzunehmen.

Infusion starten

Drücken der -Taste zum Starten der Infusion.

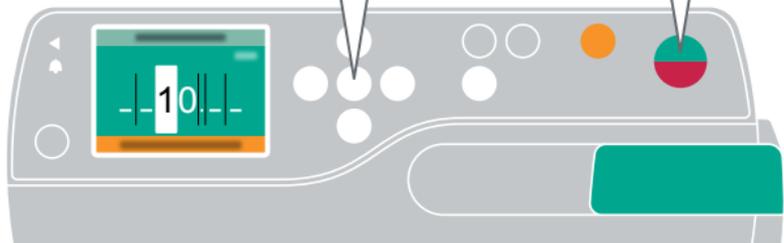

1. Aufrufen des Hauptmenüs durch Drücken der -Taste

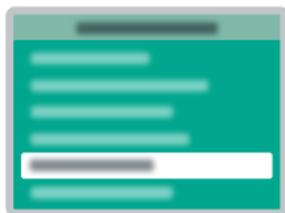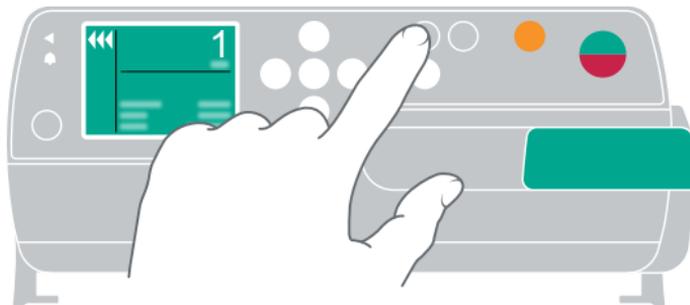

2. Gewünschten Menüpunkt wählen und mit -Taste bestätigen




3. Wenn die Pumpe gestoppt ist, kann die Therapie zurückgesetzt werden

1. Aufrufen des Hauptmenüs durch Drücken der **MENU**-Taste

▲ HINWEIS

Auswahl nur möglich bei eingelegerter Leitung und wenn die Infusion noch nicht gestartet wurde!

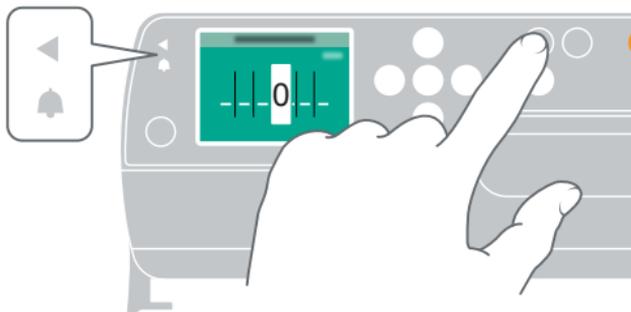


2. Medikamentendatenbank im Hauptmenü anwählen und das entsprechende Medikament auswählen und mit **OK**-Taste bestätigen
3. Fehlende Parameter eintragen und Infusion starten



Medikamentenname wird im Run-Screen angezeigt.

1. Anpassung der Infusionsrate während einer laufenden Therapie durch Drücken der **OK**-Taste

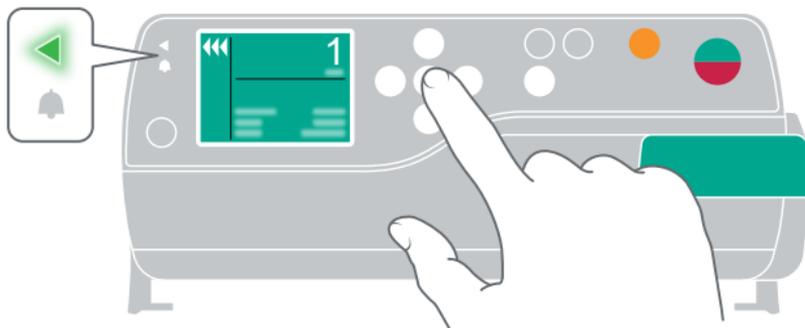


2. Ratenanpassung über Pfeil-Tasten vornehmen und mit **OK**-Taste bestätigen



Bolus applizieren

1. -Taste während einer laufenden Infusion drücken

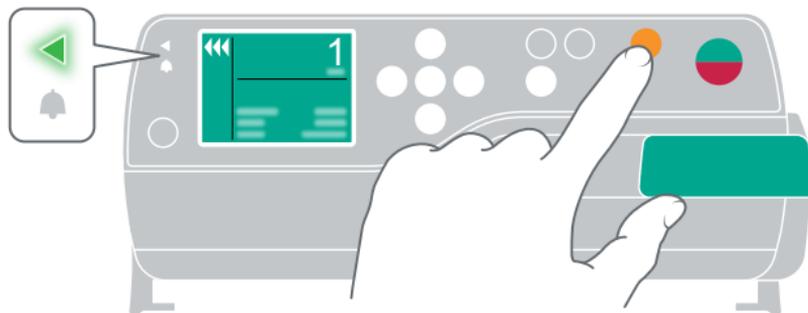


2. Bolusart wählen

Bolus mit Volumenvorwahl


Bolusvolumen über -Taste eingeben und -Taste zum Auslösen drücken.

Manueller Bolus


-Taste erneut drücken und gedrückt halten.

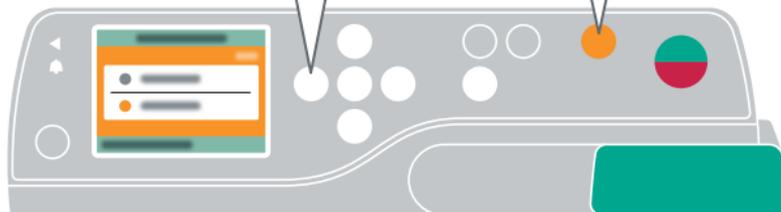

1. Um den Leitungswechsel durchzuführen, die laufende Infusion durch Drücken der -Taste stoppen. Anschließend die Rollenklemme schließen und die Patientenverbindung trennen.

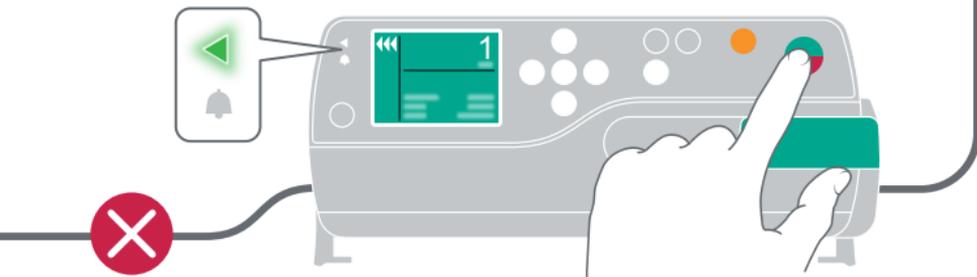


2. Pumpentür durch Ziehen des Türhebels öffnen

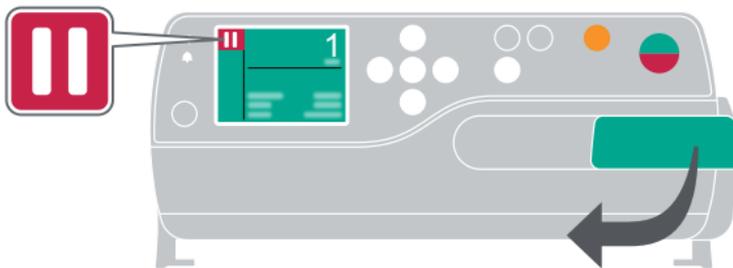

3. Anweisungen auf dem Display folgen, um die Leitung zu entnehmen und eine neue Leitung einzulegen

Voralarm

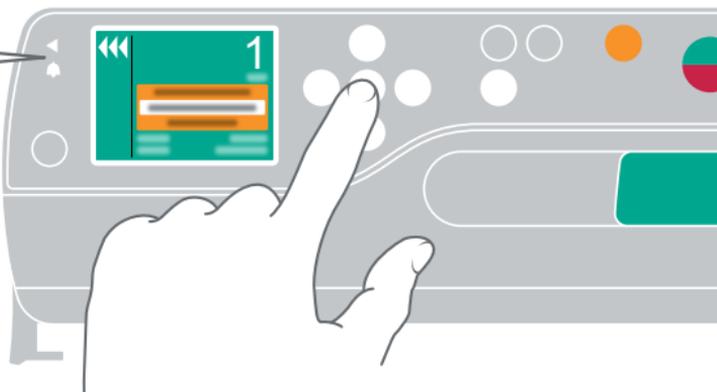

▲ HINWEIS

Infusion läuft bei einem Voralarm weiter.


1. Mit der -Taste den Voralarm stummschalten




Die Alarmursache bleibt bis zum Betriebsalarm in der Displayanzeige erhalten.



▲ HINWEIS
Infusion stoppt
bei einem
Betriebsalarm!

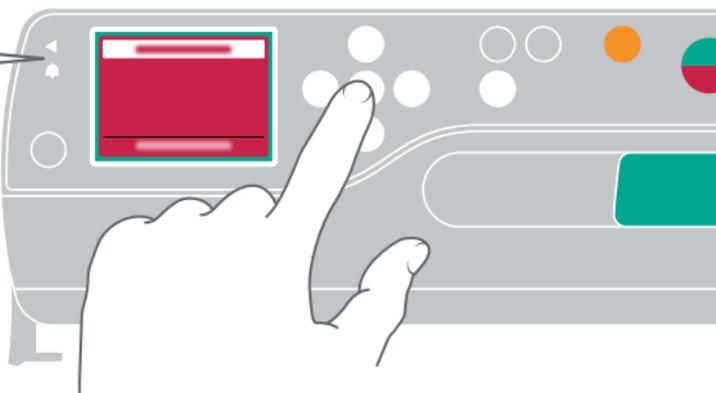


1. Mit der -Taste den Alarm bestätigen
2. Alarmursache beheben und Infusion durch Drücken
der -Taste fortsetzen oder Leitung entnehmen

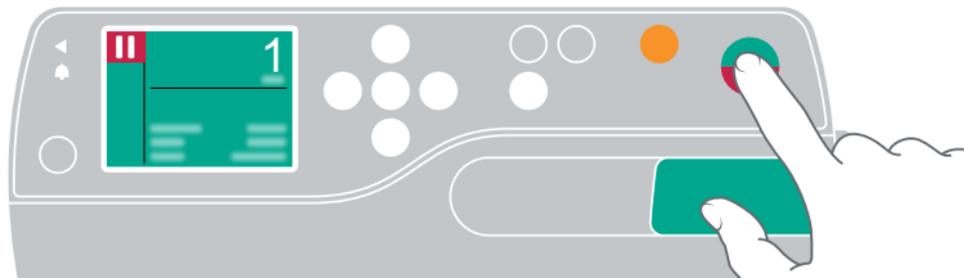

Standby

1. Bei eingeleger Leitung die -Taste gedrückt halten

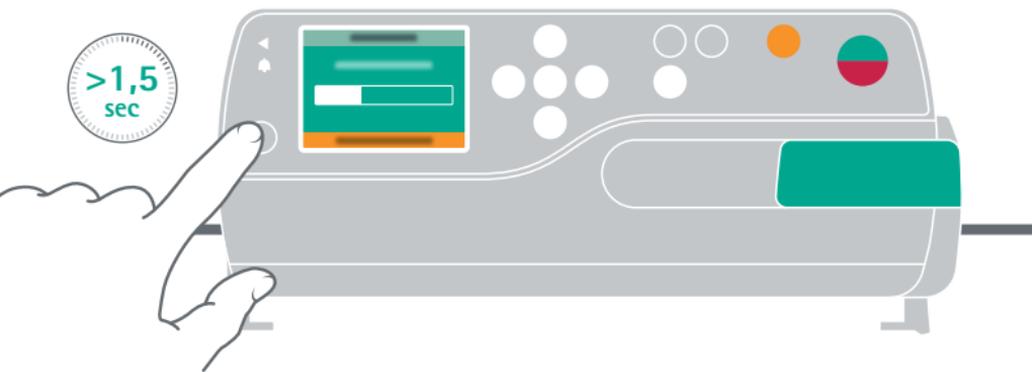


2. Mögliche Optionen:

Beenden

Durch Drücken der -Taste Standby vorzeitig beenden.

Anpassen

Standby-Zeit durch Drücken der -Taste anpassen.

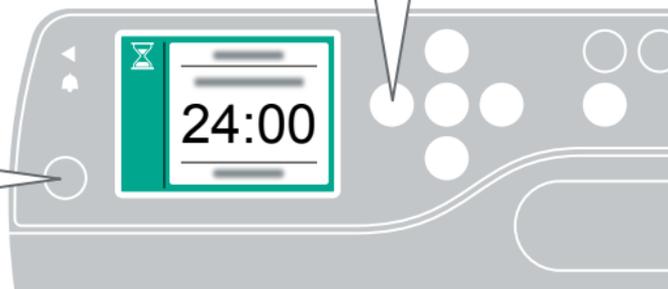


1. Ausschalten der Pumpe durch Drücken der -Taste



HINWEIS


Das Ausschalten ist nur mit entnommener Leitung möglich!

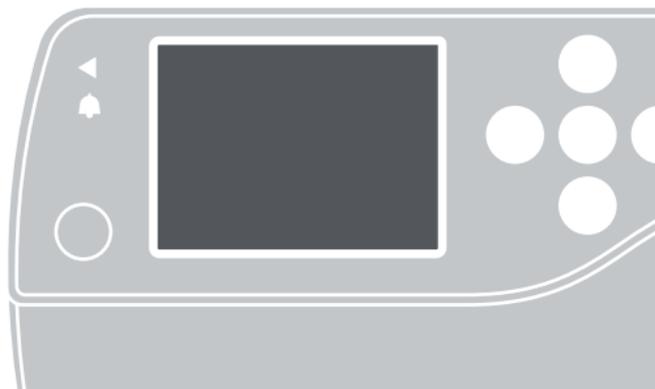


Desinfektion



Gerät ausschalten!
Gerät vom Patienten trennen!
Gerät vom Stromnetz trennen!
Gerät vom Zubehör trennen!

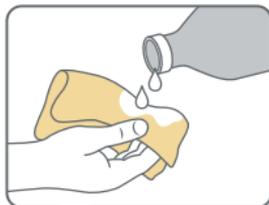

1. Verschmutzungen mit einem sauberen, weichen und fusselfreien Tuch entfernen
2. Desinfektion des Gerätes mit einem nebelfeuchten Tuch
3. Die Einwirkzeit des Desinfektionsmittels beachten

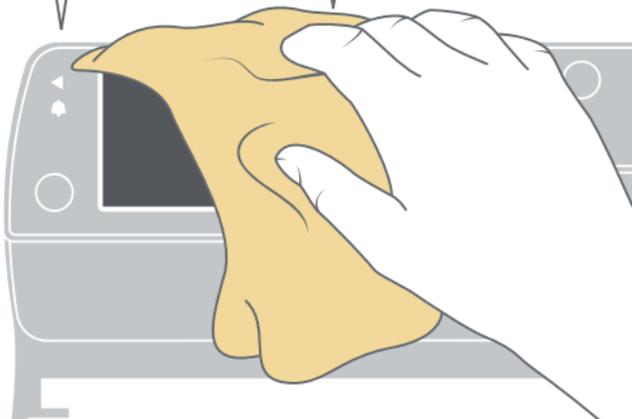

- GB Scan datamatrix and find the Instruction for Use via the article number 8717050
- DE Scanne den QR-Code und finde die Gebrauchsanweisung unter der Artikelnummer 8717050
- BG Сканирайте QR кодът за да намерите инструкциите за употреба чрез артикулен номер 8717050
- CZ Naskenujte QR kód a vyhleďte Návod k použití prostřednictvím katalogového čísla 8717050
- ES Escanee el código QR e introduzca la referencia 8717050 para localizar sus Instrucciones de Uso
- FR Scannez le QR code et recherchez la notice d'utilisation via le code article 8717050
- HU Olvassa be a QR-kódot, majd a használati utasítást a 8717050 cikkszámomnál találja meg
- IT Scansiona il QR-code e accedi alle Istruzioni per l'Uso tramite il codice articolo 8717050
- LT Nuskanuokite QR kodą ir rasite produkto, kurio ref. kodas yra 8717050 vartotojo instrukciją
- LV Skenējiet QR kodu un atrodiēt lietošanas instrukciju, norādot artikula numuru 8717050
- NL Scan QR-code en vind de gebruiksaanwijzing via artikelnummer 8717050
- PL Zeskanuj QR-code i znajdź instrukcję obsługi pod numerem artykułu 8717050
- PT Faça a leitura do código QR-code para aceder às instruções de utilização relativas ao código de artigo 8717050
- RO Scanați codul QR pentru Instrucțiunile de utilizare ale articolului 8717050
- RS Skenirajte QR-kod kako bi došli do Uputstva za korišćenje za artikal broj 8717050
- RU Отсканируйте QR-код, чтобы открыть Инструкцию по применению на артикул 8717050
- SK Naskenujte QR kód a vyhľadajte Návod na použitie prostredníctvom katalogového čísla 8717050
- TH สแกนคิวอาร์โค้ดและค้นหาคำแนะนำการใช้งานโดยใส่รหัสสินค้าหมายเลข 8717050
- TR Karekodu tarayarak 8717050 Kodlu odlu ürün için kullanma kılavuzuna
- VN Naskenujte QR kód a vyhľadajte Návod na použitie prostredníctvom katalogového čísla 8717050

