


Space^{plus} Infusomat[®]

Kurzanleitung



B | BRAUN
SHARING EXPERTISE


Aufbau des Geräts

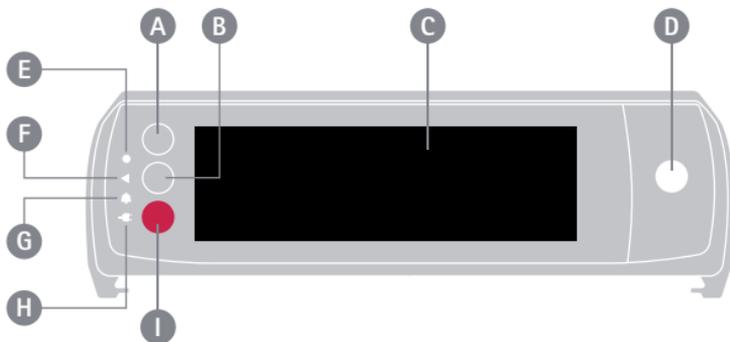


- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| A Home-Taste | F Förderungs-LED |
| B Ein/Aus-Taste | G Alarmindikator |
| C Touchdisplay | H Netzspannungs - LED |
| D Frontklappe-auf-Taste | I Stop-Taste |
| E Helligkeitssensor | |

Einschalten & Selbsttest

1. Einschalten mit Ein/Aus-Taste

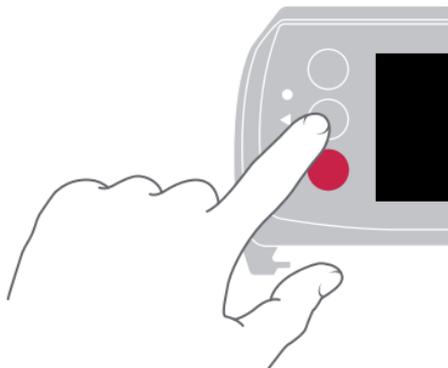


2. Funktionalität der Status-LEDs prüfen

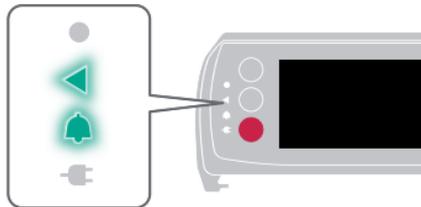



3. Funktionalität des Displays prüfen



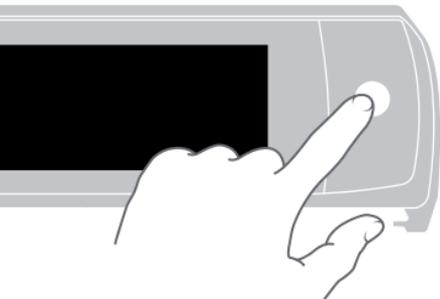


1. **Frontklappe-auf**-Taste drücken, um die Öffnung der Frontklappe einzuleiten

2. Zum Einlegen der Leitung, muss die Pumpe im folgenden Zustand sein

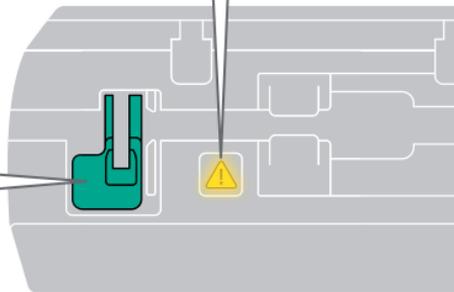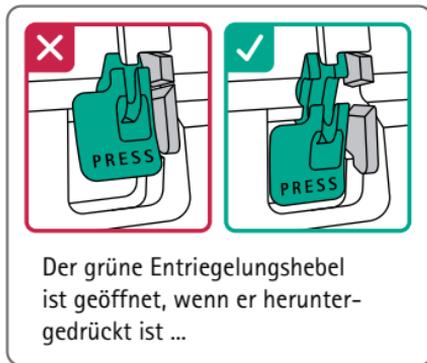


Leitung einlegen

3. Neue Leitung einlegen

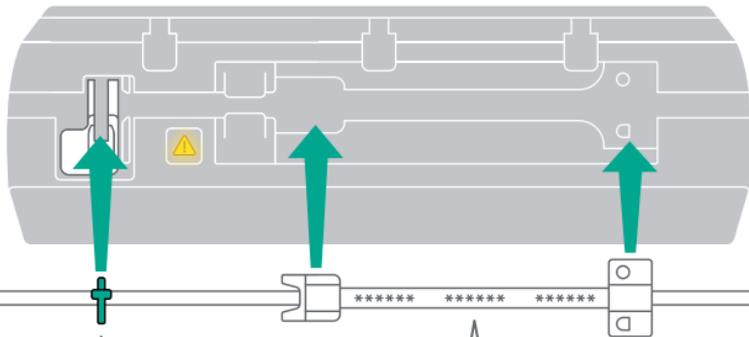

Die Free-Flow-Klemme darf nur in den dafür vorgesehenen Schlitz geschoben werden...

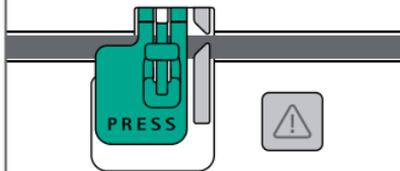


... und die Warnleuchte erlischt.

⚠ ACHTUNG


Das Silikonlement darf nicht verdreht sein!



4. Die Infusionsleitung muss überall im Schlauchführungskanal liegen

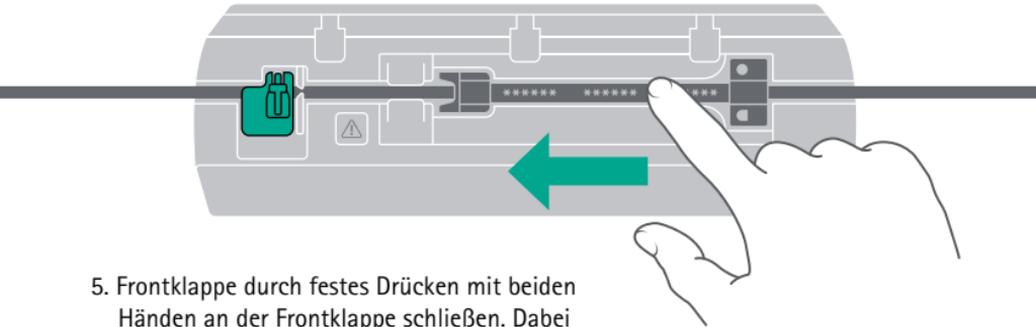


5. Frontklappe durch festes Drücken mit beiden Händern an der Frontklappe schließen. Dabei solange drücken, bis zu hören und zu fühlen ist, dass die motorisierte Verriegelung die Frontklappe schließt.

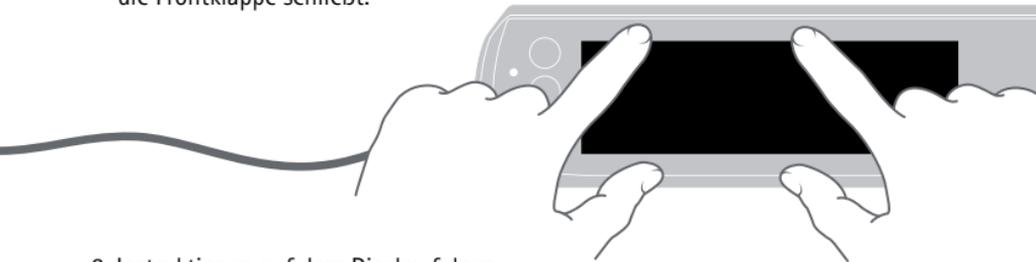


6. Instruktionen auf dem Display folgen

Infusion programmieren

1. Home-Taste drücken

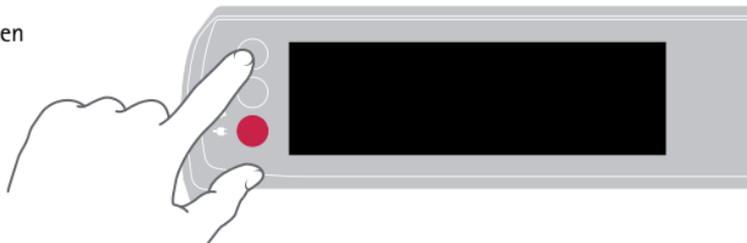


2. Neue Infusion anwählen

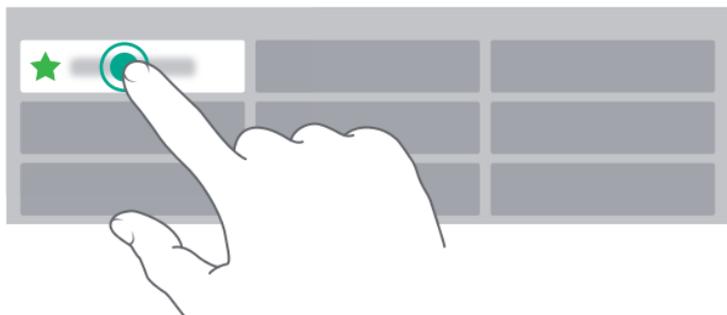


3. Instruktionen auf dem Display folgen

⚠ WICHTIG

Bolusgabe ist nur bei laufender Infusion möglich!

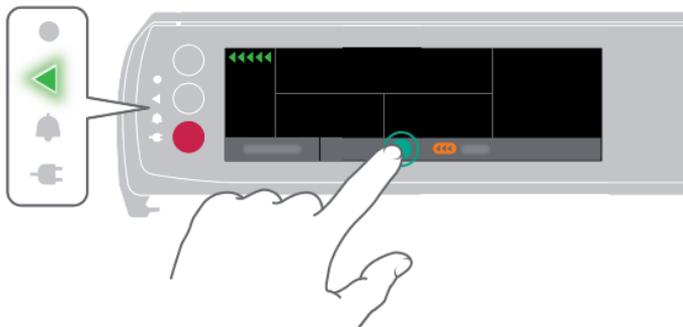

1. <<< Button auf dem Förderscreen drücken
2. Bolusart wählen

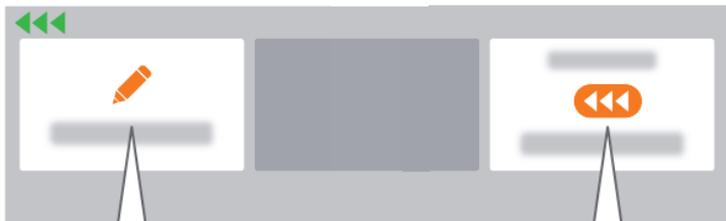

Programmierter Bolus

- Bolusmenge und Bolusdauer eingeben, um den Bolus zu definieren

Manueller Bolus

- Bolus wird gefördert solange der Button gedrückt wird.



Leitung wechseln


1. **Stop** Taste drücken, um die Infusion zu stoppen

2. Rollenklemme schließen und Patientenverbindung trennen




3. **Frontklappe-auf**-Taste drücken, um die Frontklappe zu öffnen


4. Entriegelungshebel herunterdrücken, die Warnleuchte blinkt

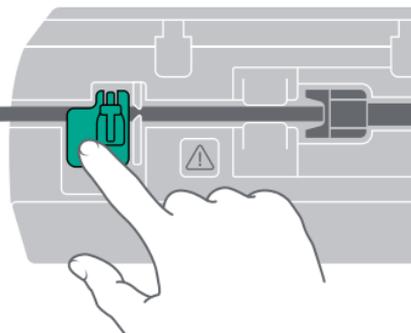

5. Leitung ersetzen

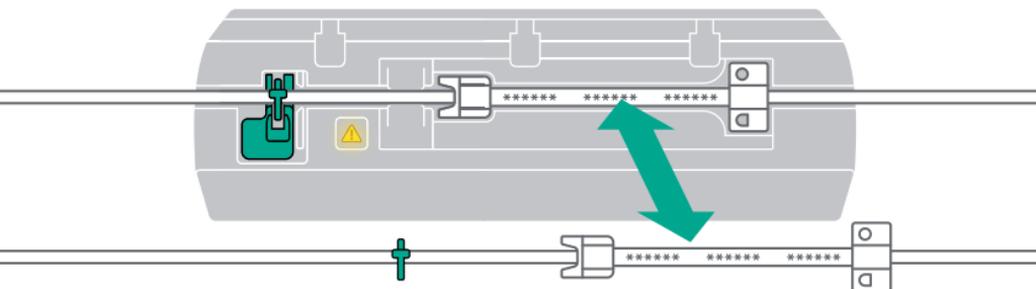

6. Frontklappe durch festes Drücken mit beiden Händen an der Frontklappe schließen. Dabei solange drücken, bis zu hören und zu fühlen ist, dass die motorisierte Verriegelung die Frontklappe schließt.

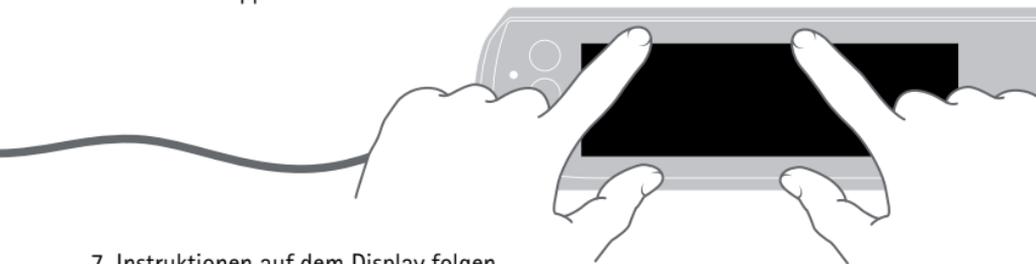

7. Instruktionen auf dem Display folgen


Voralarm

⚠ WICHTIG

Infusion läuft bei
einem Voralarm
weiter




1. Mit dem ~~X~~ Button den Voralarm stummschalten
2. Eine kleine Version des Alarmfensters ist weiterhin auf dem Display zu sehen

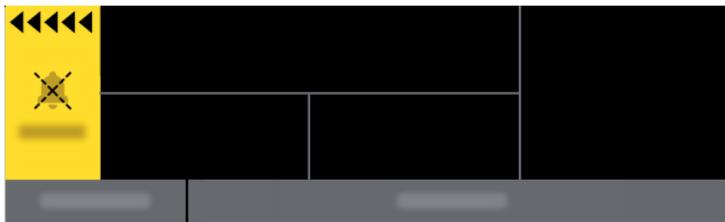

Wiederholt sich automatisch!

⚠ WICHTIG

Infusion wird bei einem Betriebsalarm gestoppt!

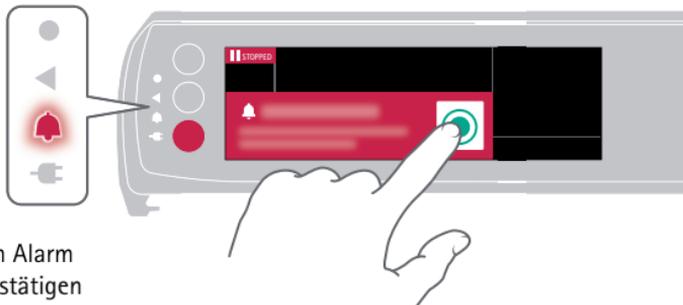

1. Mit dem  Button den Alarm stummschalten und bestätigen
2. Eine kleine Version des Alarmfensters ist weiterhin auf dem Display zu sehen




Infusion fortsetzen

- Fehlerursache beheben und Infusion fortsetzen


Luftalarm

⚠ WICHTIG

Infusion wird bei einem Betriebsalarm gestoppt!

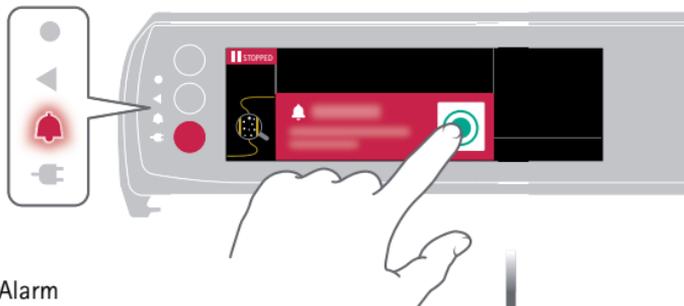

1. Mit dem  Button den Alarm stumm schalten und bestätigen
2. Rollerklemme schließen und Patientverbindung trennen

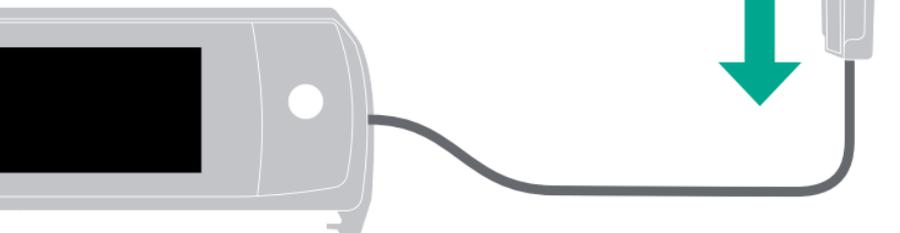

3. Rollerklemme öffnen und eine der beiden Möglichkeiten wählen


Automatisches Entlüften

- Mit Hilfe der Pumpe
Leitung entlüften



Manuelles Entlüften


- Frontklappe öffnen,
Leitung entnehmen
und manuell entlüften

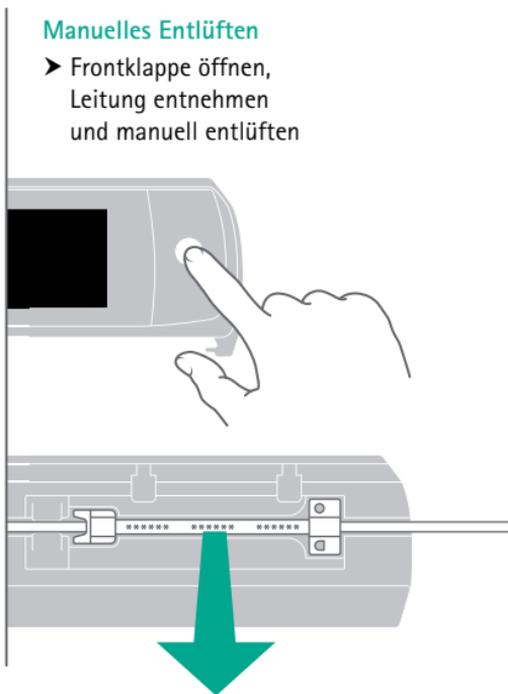

4. Infusion weiterführen

Druckstufe auswählen


1. Home-Taste drücken

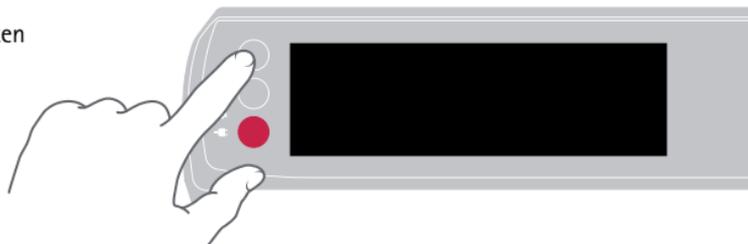

2. Druckstufe anwählen



3. Druckstufen-Menü

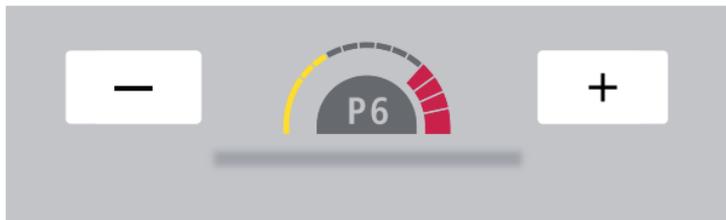

4. Der Förderscreen zeigt den anliegenden Systemdruck und Abschaltdruck




Der weiße Zeiger des Manometers zeigt den aktuellen Druck im Infusionssystem an. Je niedriger die gewählte Druckstufe ist, desto größer wird der graue Bereich des Manometers. Sobald der Zeiger in diesen grauen Bereich gelangt, wird ein Druckalarm ausgelöst.

Standby / Ausschalten

Ein/Aus-Taste drücken

>2s

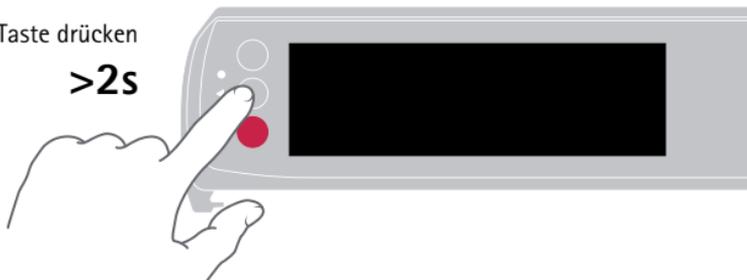

Mit eingeleger Leitung

- Pumpe geht in den Standby-Modus



Ohne Leitung

- Pumpe schaltet sich aus

DE Scanne den QR-Code und finde die Gebrauchsanweisung unter der Artikelnummer 8719050
GB Scan datamatrix and find the Instruction for Use via the article number 8719050



B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel. (0 56 61) 9147 - 70 00
E-Mail: info.de@bbraun.com | www.bbraun.de
Betriebsstätte: Melsungen | Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen

HD.00,5.02.22/1 | Nr. 4007284 | 04/2022