

# ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

## Softa® Cloth CHX 2%

### WISCHDESINFEKTION FÜR MEDICAL DEVICES:

Softa® Cloth CHX 2% ist zugelassen als Medizinprodukt nach Medical Device Directive 93/42. Einzel verpackte Desinfektionstücher.  
Keine Aerosolbildung, da auf Sprühen verzichtet wird.

### MIKROBIOLOGISCHE WIRKSAMKEIT:

Softa® Cloth CHX 2% ist wirksam gegen Bakterien und Hefepilze mit remanenter Wirksamkeit.

### WANN?

Zur Wischdesinfektion und Reinigung von Konnektionsstellen im Prozess der sicheren Infusionstherapie.

### WIE?



1. Hygienische Händedesinfektion (30 Sek.):  
Vor jeder aseptischen Tätigkeit und Handschuhe anziehen



2. Softa Cloth® auspacken und entfalten



3. Visuell reine Oberflächen: Konnektionsstelle abwischen und abtrocknen lassen; Tuch werfen. Bei sichtbarer Verschmutzung: Konnektionsstelle abwischen; Tuch werfen; mit 2. Tuch desinfizieren; wischen und abtrocknen lassen. Bakterizidie (prEN13727) und Levurozidie (prEN13624): 15 Sek. (reine und unreine Bedingungen)



4. Konnektion vornehmen:  
Zuspritzstelle ohne Membran-Ventil (Bsp.: Discofix®-Dreivegehahn) mit neuem, sterilem Verschlussstopfen verschließen



5. Handschuhe ausziehen und werfen und anschließend Hygienische Händedesinfektion (30 Sek.)

