



Infusionstherapie

Venofix[®] Safety

Sicherheits-Venenpunktionsbesteck für die
Blutentnahme und Kurzinfusion

Venofix® Safety

Venenpunktionsbesteck mit Sicherheitsmechanismus

Das Sicherheits-Venenpunktionsbesteck Venofix® Safety kombiniert hohen Anwendungskomfort mit einfachem Handling. Venofix® Safety kann für Kurzinfusionen, Injektionen, Transfusionen und die Blutentnahme verwendet werden. Die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus in der Vene sorgt für ein Mehr an Sicherheit.

1. Venenpunktion




Desinfizieren Sie den Punktionsbereich vor der Punktion gemäß der hausinternen Richtlinien. Halten Sie die Kanüle für die Punktion an den nach oben geklappten Flügeln. Der Blutrückfluss in der transparenten Kammer hinter dem Katheteransatz bestätigt die erfolgreiche Venenpunktion.

2. Fixierung



Bitte achten Sie bei der Fixierung der Venofix® Safety darauf, dass die **beiden Seiten des Gehäuses frei bleiben**, um die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus nicht zu behindern.

3. Aktivierung des Sicherheitsmechanismus

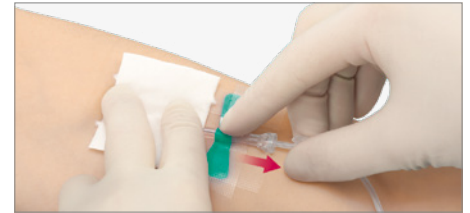


Für Ihre Sicherheit: Aktivieren Sie den Sicherheitsmechanismus in der Vene durch einen leichten 2-Fingerdruck des Gehäuses mit Daumen und Mittelfinger und **ziehen** Sie anschließend die transparente Kammer zurück, bis der Sicherheitsmechanismus mit einem **hör- und spürbaren Klick** einrastet.

Merkmale

- Einfacher Einhand-Aktivierungsmechanismus
- Aktivierung in der Vene: Die Kanüle ist berührungssicher umschlossen
- Punktionskanüle aus Chrom-Nickel-Stahl mit 3-Facetten-Schliff für einen reduzierten Punktionschmerz
- Silikonisierte Kanüle für einen reduzierten Kraftaufwand beim Einstich und Vorschieben
- Große, weiche Flügel mit ineinander greifenden Mulden für einfaches Halten
- Knickstabiler, transparenter PVC-Schlauch
- Farbcodierte Flügel gemäß DIN EN ISO 6009 mit Größenkennzeichnung
- Nicht hergestellt mit Latex und DEHP
- Lock-Ansatz
- Verschlusskonus Lock

Aktiver Sicherheitsmechanismus

- 1 Drücken Sie beide Seiten des Gehäuses zusammen
- 2 Ziehen Sie das Gehäuse zurück bis ein hörbarer
- 3 Klick erfolgt und der Sicherheitsmechanismus irreversibel aktiviert ist

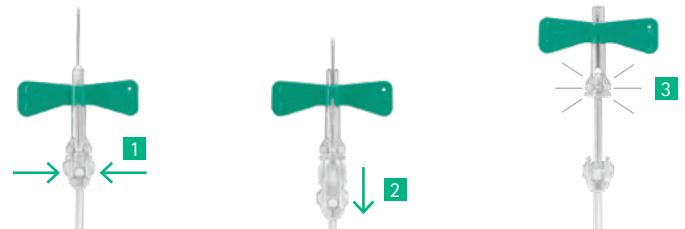

Größe (G)	Größe (Ø mm)	Stichlänge (mm)	Schlauchlänge (cm)	Durchflussrate (ml/min)	VE/Karton*	Art.-Nr. (REF)	PZN
25	0,5	19	30	4	10 x 50 Stück	4056502N	17935315
23	0,65	19	30	8		4056503N	17935321
21	0,8	19	30	20		4056504N	17935338
21	0,8	19	19	20		4056506N	17935373
19	1,1	19	30	37		4056505N	17935344

*Hinweis: Ein Umkarton zu 500 Stück enthält 10 Schachteln zu 50 Stück des jeweiligen Artikels.

AE-Preis: 0,76 €/Stück zzgl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (s. Homepage) Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf. Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke.

Für weitere Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, die den Einsatz sicherer Arbeitsgeräte regeln, scannen Sie den QR-Code.



Absender: Name/Adresse/Praxisstempel



Kundenlogo einfügen (z. B. als *.jpg, *.png, *.tiff, *.gif)