

Hygiene ist Verantwortung

Für die Einsatzbereitschaft Ihrer Infusionstechnik



Kompatibilität der B. Braun Infusionstechnik mit Meliseptol® Wipes sensitive

Bei sachgemäßem Einsatz und unter Berücksichtigung der Aufbereitungsempfehlungen des Herstellers bestätigt B. Braun die Materialverträglichkeit von Meliseptol® Wipes sensitive für die Reinigung und Desinfektion der Pumpengenerationen:

- Space®
- Space®plus
- compact®plus


Hintergrundinformationen

Anwendungsbereitschaft und hygienische Unbedenklichkeit Ihrer Medizinprodukte sind maßgeblich für eine zuverlässige Versorgung von Patienten. Dies gilt sowohl für den Einsatz im akuten Notfall als auch bei Therapien im OP oder in der Intensivmedizin.

Meliseptol® Wipes sensitive (begrenzt Viruzid in 1 Minute)

bieten die wichtige Kombination aus hoher Materialverträglichkeit, breitem Wirkspektrum sowie schneller Einwirkzeit – abgestimmt auf den Einsatz an B. Braun-Medizinprodukten.

Darüber hinaus stellt B. Braun nach individueller Prüfung Bestätigungen zur Materialverträglichkeit an einer Vielzahl weiterer Medizinprodukte aus. Sprechen Sie uns dazu gern an.

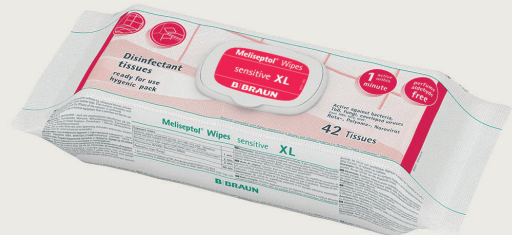

Sie können an allen B. Braun-Pumpen – und darüber hinaus ca. 90 % aller im Einsatz befindlicher Medizinprodukte reinigen und desinfizieren.

Umfassende Informationen zu unseren Meliseptol® Wipes sensitive finden Sie unter diesem QR-Code.



Hygiene ist Verantwortung

Für die Einsatzbereitschaft Ihrer Infusionstechnik

Trennen Sie alle Patientenverbindungen vor der Reinigung/Desinfektion!

Schalten Sie die Space^{®plus} Station aus und trennen Sie das Ordnungssystem immer von der Stromversorgung sowie von weiterem Zubehör.



Entnehmen Sie alle Pumpen aus der Space^{®plus} Station. Prüfen Sie die Station auf sichtbare Verunreinigungen und wischen Sie diese mit einem gebrauchsfertigen, zugelassenen (fussel freiem) Desinfektionstuch ab. Entsorgen Sie das Tuch nach Gebrauch.



Bei starker Verunreinigung nehmen Sie den Gehäusedeckel (Cover) der Space^{®plus} Station ab und desinfizieren Sie diesen mittels des vorgetränkten Tuches Meliseptol[®] Wipes sensitive und Meliseptol[®] acute Wipes.



Desinfizieren Sie mit einem weiteren Tuch die Space^{®plus} Pumpen – beginnen Sie mit dem Gehäuse.

In diesem Schritt ist die Vorgehensweise im Rahmen der Routine-Reinigung/-Desinfektion gleich.



Nachdem Sie das Gehäuse vollständig desinfiziert haben, öffnen Sie nun die Frontklappe und desinfizieren die Innenseite.

In diesem Schritt ist die Vorgehensweise im Rahmen der Routine-Reinigung/-Desinfektion gleich.



Nach Beendigung des Reinigungs/Desinfektionsvorgangs UND dem vollständigen Abtrocknen aller gereinigten und desinfizierten Bestandteile des Space^{®plus} Systems können Sie die Pumpen wieder in die Space^{®plus} Station einsetzen. Der Reinigungs-/Desinfektionsvorgang ist beendet.

Die Strom- und Patientenverbindung können nun wieder hergestellt werden.

