

Wipes Basic Bag

Einwegtuchspender zum Verwenden mit verschiedenen B. Braun Desinfektionsmitteln



Produktmerkmale

- Hochstabile, einfach zu handhabende Packung mit Füllstandskontrolle für das Desinfektionsmittel
- PET-Vliestücher zur Verwendung mit verschiedenen Desinfektionsmitteln
- 100 % saugfähige und fusselfreie PET-Vliestücher geben den Desinfektionswirkstoff sicher an die zu desinfizierende Fläche ab
- In 15 Minuten einsatzbereit und sechs Wochen haltbar – auch in Hochrisikobereichen
- Der wiederverschließbare Deckel schützt vor Kontamination und Verdunsten der Lösung

Über das Produkt


Der B. Braun Wipes Basic Bag ist ein innovatives Vliestuchspendersystem für Hygieneverfahren. Befüllt mit medizinischem Desinfektionsmittel eignet sich das System zur Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art, um medizinische Hygienestandards zu erfüllen.

Das kompakte B. Braun Wipes Basic Bag System ist ein praktischer Zeitsparer und ist bereits mit einer Rolle Vliestüchern vorgefüllt. Nach Zugabe des Desinfektionsmittels und der erforderlichen Einwirkzeit von 15 Minuten kann jeglicher Desinfektionsvorgang durchgeführt werden. In Kombination mit den in der folgenden Tabelle aufgeführten Produkten bleibt der B. Braun Wipes Basic Bag 42 Tage

Wirkungsspektrum Verwendung bei Raumtemperatur (min. 20°C)	Konzentrationen & Einwirkzeit	
Hexaquart® XL	1 %	15 min.
Hexaquart® pure	1 %	5 min.
Meliseptol® rapid	konzentriert	1 min.
Meliseptol® Foam pure	konzentriert	1 min.
Meliseptol® acute	konzentriert	1 min.
Ethanol 70 % denat.	konzentriert	5 min.

Einwegtuchspender zum Befüllen mit verschiedenen Desinfektionsmitteln

Hinweise zur Anwendung

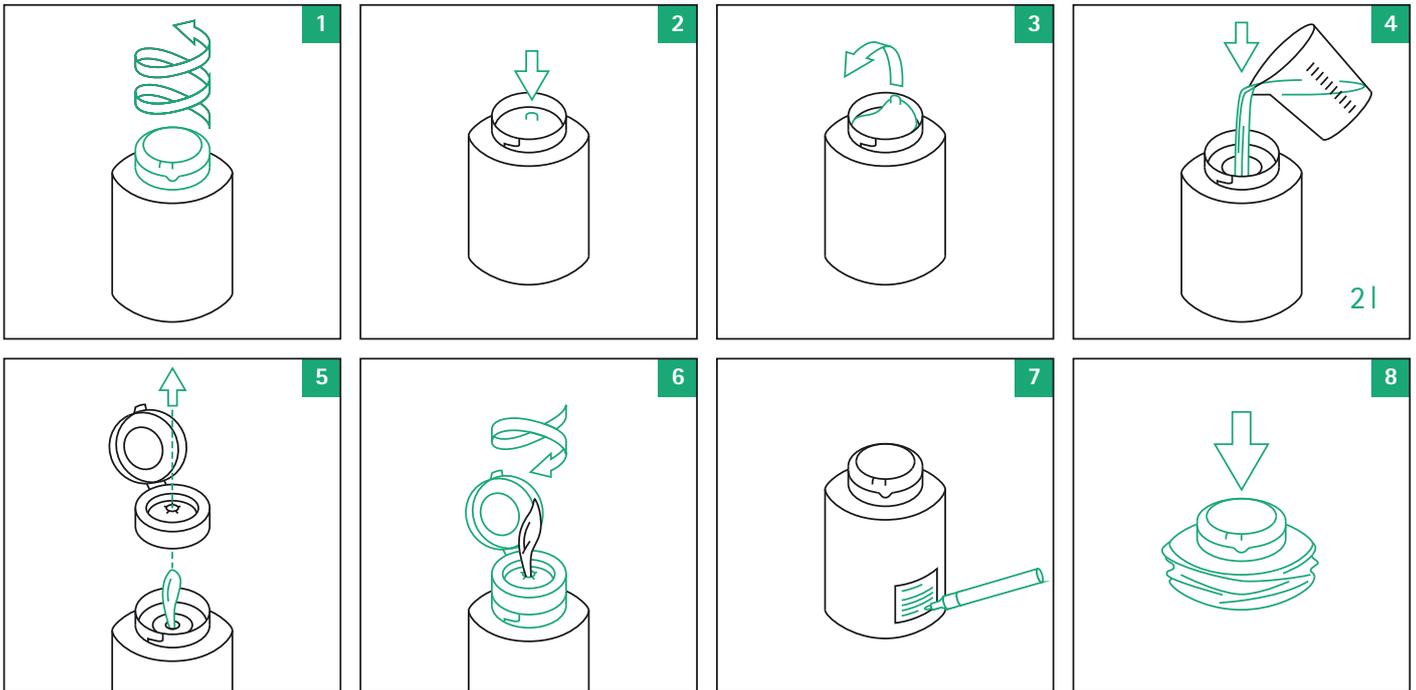

Anwendungsbereiche

Mit dem B. Braun Wipes Basic Bag Einwegtuchspendersystem können Vliestücher mit medizinischem Flächendesinfektionsmittel getränkt, hygienisch gelagert und verwendet werden. Diese Tücher können zur Reinigung und Desinfektion aller Arten von medizinischen Geräten und Flächen verwendet werden.

Gebrauchsanweisung

Der B. Braun Wipes Basic Bag ist bereits mit einer Rolle trockener Vliestücher vorgefüllt. Sie können nun ein Desinfektionsmittel, das Sie in den Beutel füllen möchten, auswählen:

- Bereiten Sie 2 Liter Anwendungslösung des B. Braun Desinfektionsmittels Ihrer Wahl vor (beachten Sie die Angaben zur Anwendungskonzentration und Einwirkzeit).
- Öffnen Sie die Schutzkappe des Vliestuchspenders.
- Entfernen Sie die beiden Teile der Membran, die die Versiegelung bilden.
- Füllen Sie 2 Liter Desinfektionsmittellösung ein.
- Fädeln Sie nun das oberste Tuch durch die ankerförmige Öffnung des Spenders.
- Ziehen Sie das erste Tuch heraus und entsorgen Sie es.
- Füllen Sie alle Dokumentationsfelder auf dem Etikett aus.

Nach einer 15-minütigen Tränkzeit ist das System einsatzbereit. Eine Befüllungsanleitung ist auf Anfrage erhältlich.

Produktgröße	REF
Basic Bag mit 120 Tüchern	180357